

GETINGE
GETINGE GROUP

**SERIE 46 DE GETINGE
LAVADORAS DESINFECTADORAS**



Always with you

¿Cuántos materiales reutilizables tiene que procesar? ¿De qué tipo? La serie 46 de Getinge incluye máquinas adaptadas con precisión a sus necesidades.

Opciones adicionales

- Control del caudal – para calibrar el caudal en las bombas de detergente y detener el proceso si no se ha dispensado la cantidad establecida.
- Impresora – independiente o integrada en la máquina.
- Bombas dosificadoras adicionales - de serie se suministran dos, pero los modelos Getinge 46-5 y 46-4 se pueden equipar con dos más y el modelo Getinge 46-2 con una más.
- Paneles de cierre - para establecer la barrera de separación.
- Control de la presión - para comprobar la presión del agua.
- Refrigeración de drenaje – para enfriar el agua usada.
- Válvula de agua purificada – para el agua de aclarado final.
- Bomba de agua purificada – para el agua de aclarado final a baja presión.
- Control del filtro – para supervisar el filtro estéril.
- Control de conductividad – para comprobar que no queden restos de detergente en el agua de aclarado final y, por tanto, tampoco en los materiales procesados.
- Señal acústica – para cuando se produce una alarma.



NI MÁS, NI MENOS

Las nuevas lavadoras desinfectadoras Getinge de la serie 46 han sido adaptadas con precisión para que respondan a todas y cada una de las necesidades del sector sanitario. Elija entre dos, cuatro o cinco niveles, en función del tipo y la cantidad de materiales que tenga que procesar.

La serie 46 de Getinge incluye máquinas para pabellones, ambulatorios, bloques quirúrgicos y centrales de esterilización. Estas lavadoras desinfectadoras procesan todo tipo de materiales reutilizables, desde instrumental complejo hasta utensilios para pabellones. También permiten lavar, desinfectar y secar todo tipo de instrumental tubular.

Una elección rentable

Una lavadora desinfectadora equipada con los accesorios necesarios para satisfacer sus necesidades es rentable desde el primer día. La serie 46 de Getinge dispone del modelo adecuado para cada departamento.

Gran capacidad de lavado

Las lavadoras desinfectadoras Getinge de la serie 46 combinan cámaras de gran capacidad con dimensiones exteriores reducidas. El modelo Getinge 46-5 tiene carros de lavado de instrumental de 5 niveles, mientras que en el modelo Getinge 46-4 los carros son de 4 niveles.

Todas las bandejas y brazos aspersores son extraíbles, y las fijaciones de los brazos aspersores se pueden usar para otros accesorios, por ejemplo para limpiar materiales más difíciles como los instrumentos tubulares.



Getinge 46-2: para pabellones y ambulatorios. Los materiales se disponen en dos niveles.



Getinge 46-4: para bloques quirúrgicos y centrales de esterilización más pequeños. Los materiales se disponen en cuatro niveles.



Getinge 46-5: para bloques quirúrgicos y centrales de esterilización más grandes. Los materiales se disponen en cinco niveles.

Lavadora desinfectadora Serie 46 de Getinge	MODELO DE LAVADORA DESINFECTADORA		
	46-2	46-4	46-5
Niveles de lavado	2	4	5
Altura de la cámara	590 mm	590 mm	660 mm
Anchura de la cámara	550 mm	550 mm	550 mm
Profundidad de la cámara	620 mm	620 mm	620 mm
Bandejas DIN 1/1 por carga*	4	8	10
Bandejas SPRI II por carga**	4	8	10

* Tamaño de bandeja: 485x250x50 mm

** Tamaño de bandeja: 340x250x70 mm

GETINGE

16-4



EXPERIMENTE LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

La 46 es una serie única que se basa en comentarios de los usuarios y en elaboradas ideas de nuestros diseñadores industriales. En esta serie se combinan soluciones higiénicas y ergonómicas con la tecnología más avanzada, para garantizar al usuario una seguridad inigualable que incluye alarmas integradas.



Cumplimiento de todas las normas

La gama 46 de Getinge ofrece una limpieza y desinfección superiores. Estas lavadoras desinfectadoras cumplen todas las normas actuales aplicables, incluida la ISO EN 15883.

Diseño muy pensado

El diseño de la nueva serie 46 de Getinge se basa en los comentarios de los usuarios y los técnicos de mantenimiento sobre lo que consideran más adecuado:

- **PUERTA DE CRISTAL** – ofrece una visión perfecta del proceso. Se suministra de serie en todas las máquinas de la serie 46 de Getinge.
- **TIRADOR ERGOMÓMICO** – facilita la apertura y el cierre de la puerta.
- **SUPERFICIES LISAS** – fáciles de limpiar y sin antihigiénicas ranuras en las que se pueda acumular la suciedad.
- **MENOS PANELES** – fáciles de desmontar y limpiar, garantizan un cómodo mantenimiento desde la parte delantera.

Nuevo sistema de control

En las lavadoras desinfectadoras Getinge de la serie 46, los procesos están protegidos por el nuevo sistema de control PACS 300. Este sistema incorpora numerosas funciones de seguridad y opciones de control integradas para garantizar los mejores resultados en todo momento.

Secado eficaz y económico

Las lavadoras desinfectadoras de la serie 46 de Getinge secan los materiales por dentro y por fuera con gran eficacia. La duración y la temperatura de secado se pueden predefinir para cada programa a través del panel de control.

Facilidad de uso

Seleccione el programa y pulse el botón de inicio: ¡su Getinge 46 se ocupará del resto! Si lo desea, puede seguir en la pantalla en texto claro todo lo que ocurre en cada etapa de los procesos de lavado y desinfección.

Conexión al sistema T-DOC

La serie 46 de Getinge está preparada para conexión al sistema Getinge T-DOC, un sistema de garantía de calidad basado en un software que hace el seguimiento de la producción y la documentación (trazabilidad). Más práctico y fiable que los sistemas basados en papel, además es tan eficiente que el coste de la inversión se recupera con mucha rapidez.

El sistema T-DOC almacena toda la información de proceso de las máquinas en un único lugar. Como resultado, puede analizar el proceso en cualquier momento a partir de los datos gráficos o los valores de registro numéricos guardados. ¡Con rapidez, seguridad y sencillez!

GETINGE 46-2

PARA PABELLONES Y AMBULATORIOS

La lavadora desinfectadora Getinge 46-2 ha sido especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los pabellones. Limpia y desinfecta los instrumentos y materiales reutilizables, incluso los tubulares, en dos niveles. Sus accesorios especialmente adaptados (véase más abajo) optimizan la capacidad de la máquina.



Amplia gama de accesorios La serie 46 de Getinge se puede equipar con muchos accesorios eficaces y que reducen el tiempo de procesamiento. En este folleto aparecen algunos, pero si desea conocer la gama completa, solicite nuestro «Catálogo de accesorios para la serie 46 de Getinge». Tenga en cuenta que los accesorios del modelo Getinge 4656 anterior también se pueden utilizar en la nueva serie 46 de Getinge.



Palanganas en dos niveles



Biberones



Carro de lavado inferior con barra inyectora en L

GETINGE 46-4 PARA BLOQUES QUIRÚRGICOS

El modelo Getinge 46-4 ha sido desarrollado específicamente para responder a las necesidades de los bloques quirúrgicos y las centrales de esterilización pequeñas. Esta máquina limpia y desinfecta todo tipo de materiales en cuatro niveles.

Cada nivel de lavado, formado por una bandeja y un brazo aspersor extraíbles, se puede adaptar en función de la necesidades. Los instrumentos tubulares se pueden colocar en un carro de lavado de material de cirugía microinvasiva, con capacidad para hasta 80 conexiones. El carro de lavado de material anestésico tiene capacidad para 4-6 equipos anestésicos con un máximo de 12 tubos.

Tirador ergonómico

Elevado nivel de higiene

Cámara lisa sin juntas soldadas ni cavidades donde puedan proliferar las bacterias.

Materiales en cuatro niveles

Cámara de gran capacidad

H590xAn550xPr620 mm.

Dimensiones externas reducidas

Con una anchura de tan sólo 650 mm, ocupa poco espacio en la sala de desinfección.

Nota: el modelo Getinge 46-4 tiene el mismo tamaño que el modelo Getinge 4656 anterior, lo cual simplifica la sustitución.

Unidad de secado exclusiva

- Eficaz, rápida y de bajo consumo energético
- Calentamiento extremadamente rápido de los elementos calefactores
- Intercambiador de calor que reduce el consumo de energía

Puerta de cristal

Facilita la supervisión del proceso.

Fácil de limpiar

Sin tornillos externos que puedan acumular suciedad.

Cómodo mantenimiento

Sólo hay que quitar unos cuantos tornillos.

Almacén integrado

Para diferentes tipos de detergentes.



Amplia gama de accesorios La serie 46 de Getinge se puede equipar con muchos accesorios eficaces y que reducen el tiempo de procesamiento. En este folleto aparecen algunos, pero si desea conocer la gama completa, solicite nuestro «Catálogo de accesorios para la serie 46 de Getinge». Tenga en cuenta que los accesorios del modelo Getinge 4656 anterior también se pueden utilizar en la nueva serie 46 de Getinge.



Carro de lavado de instrumental de 4 niveles

Carro de lavado inferior universal y carro de lavado superior básico

Carro de material anestésico

GETINGE 46-5

PARA BLOQUES QUIRÚRGICOS Y CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN

El modelo Getinge 46-5 ha sido desarrollado específicamente para responder a las necesidades de los bloques quirúrgicos y las centrales de esterilización más grandes. Esta máquina limpia y desinfecta todo tipo de materiales en cinco niveles.

Cada nivel de lavado, formado por una bandeja y un brazo aspersor extraíbles, se puede adaptar en función de las necesidades. Los instrumentos tubulares se pueden colocar en el carro de lavado de material de cirugía microinvasiva, con capacidad para hasta 80 conexiones. El carro de lavado de material anestésico tiene capacidad para 4-6 equipos anestésicos con un máximo de 12 tubos.

Unidad de secado exclusiva

- Eficaz, rápida y de bajo consumo energético
- Calentamiento extremadamente rápido de los elementos calefactores
- Intercambiador de calor que reduce el consumo de energía

Materiales en cinco niveles

Elevado nivel de higiene

Cámara lisa sin juntas soldadas ni cavidades donde puedan proliferar las bacterias.


Cámara de gran capacidad

H660xAn550xPr620 mm.

Dimensiones externas reducidas

Con una anchura de tan sólo 650 mm, ocupa poco espacio en la sala de desinfección.

Nota: el modelo Getinge 46-5 tiene el mismo tamaño que el modelo Getinge 4656 anterior, lo cual simplifica la sustitución.

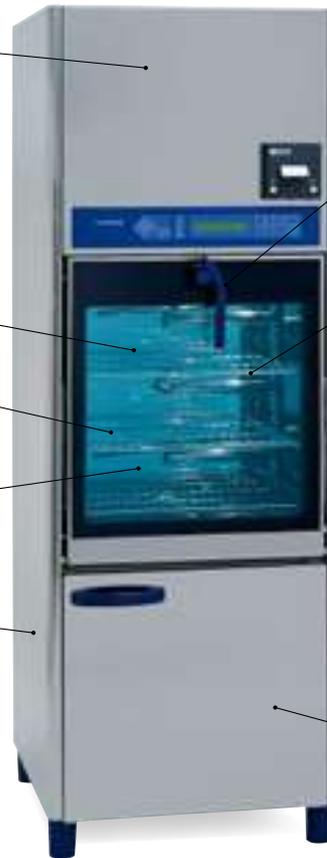

Tirador ergonómico

Puerta de cristal

Facilita la supervisión del proceso.

Fácil de limpiar

Sin tornillos externos que puedan acumular suciedad.

Cómodo mantenimiento

Sólo hay que quitar unos cuantos tornillos.

Almacén integrado

Para diferentes tipos de detergentes.



Amplia gama de accesorios La serie 46 de Getinge se puede equipar con muchos accesorios eficaces y que reducen el tiempo de procesamiento. En este folleto aparecen algunos, pero si desea conocer la gama completa, solicite nuestro «Catálogo de accesorios para la serie 46 de Getinge». Tenga en cuenta que los accesorios del modelo Getinge 4656 anterior también se pueden utilizar en la nueva serie 46 de Getinge.



Carro de lavado de instrumental de 5 niveles



Carro de lavado para contenedores



Carro para material de cirugía microinvasiva



SOLUCIONES COMPLETAS PARA EL CONTROL DE LAS INFECCIONES

Getinge es el principal proveedor a escala mundial de soluciones para una limpieza, desinfección y esterilización eficaces para el sector de la asistencia sanitaria y las ciencias de la vida. Nuestro principal objetivo consiste en ofrecer a nuestros clientes una mejor atención a un menor coste. Para ello, proponemos soluciones personalizadas con un cuidadoso diseño. Esto significa que estamos a disposición del cliente a lo largo de todo el proceso, desde la planificación técnica y la formación hasta el seguimiento y la asistencia, gracias a nuestras soluciones completas, nuestro compromiso a largo plazo y nuestra presencia internacional. Getinge – Always with you.

Getinge Ibérica

Parque Empresarial de San Fernando
Edificio Francia 1ª planta
C/ Castilla nº2
28830 San Fernando de Henares(Madrid)
Tel: +34 916 782 626
Fax: +34 916 784 051

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes dentro del ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. **ArjoHuntleigh** se centra en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la curación de las heridas. **GETINGE** proporciona soluciones de control dentro del ámbito de la asistencia médica y de prevención de contaminación dentro de las ciencias biológicas. **MAQUET** se especializa en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas y cuidados críticos.